



Universal-Prothesenreiniger

Hochkonzentrat 1:40

Wasserlöslicher Reiniger auf spezieller Wirkstoffbasis zur Entfernung von Polierpastenresten und fetthaltigen Materialien an Kronen, Brücken, Prothesen und Instrumenten zur Anwendung im Ultraschallbad und Poliernadelgerät. Entfernt auch Unterfütterungen mit Zinkoxydpaste von der Prothese rückstandslos bei höher eingestellter Anwendungslösung.

Anwendung:

Im Ultraschallbad oder Poliergerät einsetzen.

Je nach gewünschtem Wirkungsgrad 1 Teil Konzentrat mit 10–40 Teilen Wasser verdünnen und wenige Minuten einwirken lassen.

Gebinde:

1000 ml Universal-Prothesenreiniger

5000 ml Universal-Prothesenreiniger



Ultraschall – Zahnsteinlöser

Hochkonzentrat 1:20

Wasserlöslicher Zahnsteinlöser auf spezieller Wirkstoffbasis zum Entfernen von Zahnsteinablagerungen (Plaque) an Zahnprothesen. Für den Einsatz im Dentallabor, Zahnarztpraxis und Patientenanwendung.

Anwendung im Ultraschallbad:

1 Teil Konzentrat: 10 – 20 Teile Wasser.

Einwirkzeit bei alten starken Schichten 5 – 30 Minuten.

Anwendung durch Einlegen in die Lösung:

1 Teil Konzentrat: bis zu 5 Teile heißes Wasser.

Achtung: Keine Anwendung auf Eloxal und Aluminium ohne Test.

Gebinde:

1000 ml Ultraschall-Zahnsteinlöser

5000 ml Ultraschall-Zahnsteinlöser